



SIGVARIS VARİS ÇORAPLARI İLE
TOPLARDAMAR PROBLEMLERİNİN
TEDAVİSİNDE KESİN ÇÖZÜM

GANZONI
improving quality of life
SIGVARIS

SIGVARIS 500 DOĞAL KAUÇUK KALİTESİ

DOĞAL BASINÇ TERAPİSİ



SIGVARIS 500 Serileri kendisini milyonlarca kez kanıtlamış yüksek kaliteli doğal bir kauçuk ürünüdür. Bu çorabın tıbbi faydası çok sayıda tıbbi çalışmayla belgelenmiştir. Yumuşak, çift-kaplama Doğal Kauçuk yün ipliğinden (Elastidien) üretilmiş olan bu çoraplar en üstün seviye elastikiyet imkanını sağlar, yorgunluğa karşı dayanıklı ve çok sağlamdır.

Bu eşsiz özellikleri gün boyu sürekli ve etkili bir sıkıştırma verir. Bu, kan pıhtılaşması, kan pıhtılaşması sonrası sendromları, kronik toplardamar yetersizliği, ülser (yara) gibi daha ciddi tedavi şekilleri için başarılı bir tedavinin ideal ön koşuludur. Ayrıca ameliyat sonrası uygulama için de tavsiye edilmiştir.

KULLANICIYA DOST & UYUMU KOLAY

Gözenekli, son derecede geçirgen ve yüksek elastikiyetli örme kumaş, cildi havadar tutar ve bacakları en sıcak havalarda bile rahat ettirir. 500 serisi çoraplarda kullanılmış olan malzemenin elastikiyeti, bu çorapların giyilip çıkarılmasını kolaylaştırdığı gibi, aynı zamanda en yüksek basıncı da sağlar.

Doğal kauçuk ipliği bej renkli dokuma poliamid lifleriyle çift kaplamadır. Bu çoraplar, normal külotlu çorapların altına giyildiğinde dahi zarif bir görüntüye sahiptir.

Doğal Kauçuk Kalitesindeki (TRADITIONAL-Geleneksel) Varis Çorapları, varis türleri II, III ve IV, açık parmak modeli ve tüm bedenler için mevcuttur. 500 Serileri çoraplarının geniş bir dizisi ismarlama olarak mevcuttur.

SIGVARIS SERİLERİ

İyi seçilmiş bir çorap çeşidi, tedavinin her aşamasında başarı sağlar.

GELENEKSEL 500 Çift katlı elastik liflerden üretilen bu varis çorapları, bu çorapları ömür boyu giymesi zorunlu olan kişiler -yani kan pıhtılaşması sonrası rahatsızlıkları, kronik toplardamar yetersizliği, ülseri olanlar, lenf ödemi veya değişik cerrahi müdahale görmüşler için özellikle uygundur.

GLAMOUR Üstün derecede cezbedici, yumuşak ve şeffaf olan bu varis çorabının tıbbi faydası kanıtlanmıştır. Bacağa mükemmel uyum sağlayışı tedavi başarısını artırır.

ZARIF İNCE FİTİL 700 KALİTESİ Yüksek derecede elastik, çok lifli poliamid dokuma, ipek yumuşaklığı hissi verir. Modayı takip eden bayanlar, aynı zamanda hamile bayanlar ve varis çorabını ilk kez giyenler için ideal bir çoraptır.


PAMUKLU 200 Çok lifli ince ve pamuk iplik kombinasyonu; hassas ciltli kişiler için olan etkinlikleriyle günlük olarak yada boş zamanlarında faal olarak uğraşan kimseler için kullanımı uygundur. % 100 pamuklu oluşu bacak için güzel bir ortam sağlar.

ŞİDDETLİ TOPLARDAMAR TROMBOZUNUN ETKİN TEDAVİSİ DOKTORLAR İÇİN YENİ BİLGİ

Kuzey Avrupa ülkelerinin **Epidemiyolojik Verileri** bacaklarda ve pelvis bölgesinde yüksek derecede Derin Ven Trombozu (DVT) vakasını gösteriyor. Tedavi eksikliği veya yetersizliği ciddi sonuçlara yol açmakta. İlerlemesi, akciğer embolizmine (% 20), ölüme (% 2) ve kan pıhtılaşması sonrası sendromlarına (PTS) (% 60) yol açmakta.

Tromboz hastalarının % 50'si doğru anti-pıhtılaşma önlemlerine rağmen kronik toplardamar yetersizliğine yakalanmakta (CVI). Daha ileri yaştaki insanların % 2'si genelde PTS sonucu olarak ciddi CVI acıları çekmektedirler.

Damar uzmanları, hastalık tedbiri ve tedavi yöntemi olarak toplardamar düzensizliklerinin en eski tedavisi olan bacak kompresyonunu sağlayan varis çoraplarının devamlı giyilmesini öneriyorlar. Sigvaris Varis çoraplarının etkinliği 130'u aşkın süreli çalışmayla belgelendi.

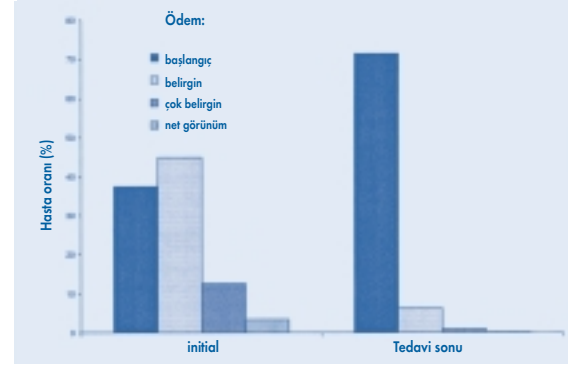

Şema, ilk tanı sonrasında ve DVT kompresyon (varis) tedavisine başlangıç sonrasında 4 haftayı gösterir.

ŞİDDETLİ TROMBOZ ESNASINDA KOMPRESYON (Basınç) TERAPİSİ

Çeşitli çalışmaların kanıtlandığı üzere, düşük moleküler ağırlıklı Heparin (kan pıhtılaşmasını engelleyen toz) destekli SIGVARIS varis çoraplarıyla yapılan acil DVT tedavisi pratiklik sağlar. Kompresyon tedavisinin kan pıhtılarının hızla çözülmesine yardım ettiği varsayılmıştır. En son fizibilite çalışmaları doğrulamaktadır ki:

- Hastanın SIGVARIS varis çoraplarıyla hemen harekete geçirilmesi, hastanın acıları ve şişleri açısından yatakta yatmasından daha iyi ve daha hızlıdır.
- Bir varis çorabı en iyi bandaj kadar etkilidir, ama uygulaması kolay olduğu gibi, maliyeti düşüktür.
- Bacağa ait en az % 80 ve pelvisle ilgili % 30 DVT, SIGVARIS 503 ve 504 calf çoraplarıyla tedavi edilebilir.
- Hastanın uyumu hemen hemen % 100'dür.

Bu çalışmaların yazılı çıktıları GANZONI/SIGVARIS'ten istenebilir veya www.sigvaris.com web sitesinden elde edilebilir.

ŞİDDETLİ TROMBOZ SONRASI KOMPRESYON (Basınç) TERAPİSİ : SÜREKLİ BİR KOMPRESYON (Basınç) HAYATİ ÖNEM TAŞIR

Trombozlu hastaların yaklaşık olarak % 50'sinde kronik toplardamar yetersizliği gelişir. Bunun olmasını engellemek veya en azından azaltmak için etkili bir kompresyon (baskı) tedavisi gereklidir. Pamuklu (SIGVARIS Cotton 212/222) veya çok lifli iplikten yapılmış çoraplar (SIGVARIS Glamour G-12, Top Fine 702) gibi ince kalitede varis çorapları genel olarak yeterlidir.



AMELİYAT SONRASI KOMPRESYON

Talimatlar: Toplardamar ameliyatı sonrası (post-ameliyat)

Doğal Kauçuk Kalitesi SIGVARIS Varis Çorapları (503, 504)'nın mükemmel ve kanıtlanmış özellikleri ameliyat sonrası da tatmin edicidir.

TIBBİ ETKİNLİK VE UYUMLULUK = BAŞARINIZ !

Avantajlar:

- SIGVARIS Varis Çoraplarının ölçüsü çorabın tüm giyilme süreci boyunca değişmez ve maksimum başarı sağlar.
- Özel SIGVARIS örgü tekniği kasıklara (karşılıklı) kadar kompresyon sağlar.
- SIGVARIS varis çoraplarının giyilmesi kolaydır. Bununla birlikte doğru bandajlama zordur , çalışma ve tecrübe gerektirir.
- Ameliyat sonrası bir tedavi olarak, varis çorapları gece vakti de giyilebilir (SIGVARIS 503)
- SIGVARIS Varis Çorapları (kalça bel bağlantılı) varis sınıflar II ve III'te ve üç boyda mevcuttur.

«Ameliyat sonrası» SIGVARIS Varis Çoraplarının Uygulanması



Gösterilen resimler hemen ameliyat sonrasındaki uygulamayı açıklar.

VARİS TEDAVİSİ SONRASI SIGVARIS KOMPRESYON (Basınçlı) ÇORAPLARININ KULLANIMI

Amaç

- Şişmeyi, yanmayı ve ödemeleri engellemek ■ hızlı iyileşmeyi sağlamak
- hastalığın tekrarlamasını engellemek ■ ağrıyı en aza indirmek
- görsel sonuçları arttırmak ■ kullanımı kolaylaştırmak
- hesaplı alım olanağı sağlamak ve tromboza karşı başarılı olmak

Yöntem

Ameliyat sonrası klasik konsept:

Bacak, ameliyat sonrasında derhal uzun streç bir bandajla boylu boyunca kompres edilir. Kazıma kanalları ve sıyrımlar kalın sargı beziyle doldurulur. Bandaj 24 ila 48 saatte bir SIGVARIS 503 veya 504 A-G çorabıyla değiştirilir (kalça-bel bağlantılı). SIGVARIS 503 geceleri giyilmelidir. 503 çorabı, pamuklu daha ince kalite bir varis çorabıyla (SIGVARIS 212/222) veya çok lifli olanlarla (SIGVARIS Glamour G-12 veya Top Fine 702) 3 ila 6 hafta arasında değiştirilebilir.

Ameliyat sonrası alternatif konsept:

Çok az sayıda bu işle uğraşan merkezler, kısa streç veya sıkı bandaj kullanıcılar (örneğin SIGVARIS varis bandajları). Bu aynı zamanda özel bir bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Skleroterapi sonrası klasik konsept:

Sargı bezi üzerine sabitlenecek destek çorabı veya çorap yardımı olarak kullanılacak bir kılıf ameliyat sonrasında derhal uygulanır. Kalça-bel bağlantılı bir SIGVARIS 503 A-G, kılıfın üstüne çekilir, ve ilk yara tetkikine kadar orada bırakılır. Eğer kanama durumunda gerekirse, bandaj lokal olarak çorabın üzerinden tatbik edilebilir. 1-2 hafta sonra, kılıf ve SIGVARIS 503 çorapları daha ince kalite bir SIGVARIS varis çorabıyla değiştirilir.

Ameliyat sonrası alternatif skleroterapi konsepti:

Kısa streç bandajlar (Sigg-bandaj) her iğne sonrasında dıştan içe doğru sürekli olarak uygulanır. Hastaya bir SIGVARIS 503 veya, sonuca göre, daha ince kalite bir SIGVARIS çorabı bu tedavinin bitişinin hemen arkasından verilir.

Bir SIGVARIS 503 çorabı distalden proximale [organın merkezden uzaksal kısmından yakınsal kısmına] her injeksiyon sırasında veya sonrasında derhal uygulanır.

VNUS kapatma veya laser tedavisi sonrası konsept:

Tedavi edilip kapatılan varisler ve sıyrıklar varis malzemesiyle kapatılır ve bandajlarla sabitlenir. Bunun üzerinden sıkı bir kompres bandajı uygulanır ve orada iki gün bırakılır. Bu süre sonunda, kompres bandajı çıkartılır ve kaplama veya destek çorabıyla kompres malzemesini yerinde tutmak için değiştirilir, buna ek olarak kalça-bel bağlantılı bir SIGVARIS 503 A-G tatbik edilir. 10 gün sonra, A-G çorabı, bir calf çorabıyla değiştirilebilir.

Varis Çoraplarının Erken Kullanımının Avantajları....

- Ameliyat öncesi tıkanıklığı gidermeyi kolaylaştırır ■ artık bandajlama güçlüğüle yapılmaz
- hastalar ve tıbbi yardımcıları için kullanımı kolaydır ■ hastalar normal kıyafet ve ayakkabılarını giyebilirler, bandajların kayması veya sıkılması artık sorun olmaz, yürümek hala mümkündür
- ayak bileği ve baldır kası mafsallarının çalışmasını kolaylaştırır

Özel SIGVARIS çorapları:

- Bacakla mükemmel bir uyum sağlar ■ gerekli basıncı garanti eder ■ kaymaz ■ buruşmaz
- kasık seviyesinde özellikle yumuşak ve rahat bir kullanım sağlar (A-G bel bağlantılı).

TIBBİ KOMPRESYON ÇORPLARI İLE TOPLARDAMAR ÜLSERİNİN TEDAVİSİ

Yetişkin nüfusun yaklaşık % 1'i alt bacakta toplardamar ülserinden yakınmaktadır. Bir çok deneysel çalışma, ülser oluşumuna yol açan kesin patofizyolojik mekanizmaların varis tedavisiyle etkili olarak azaltılabildiğini göstermiştir: toplardamardaki kan akımının yavaşlaması, akım yavaşlaması, (stasis), toplardamar geri akışı ve akabinde toplardamar bacak mafsallının aşırı dolması, damar kanallarının genişlemesi ve ödemle küçük kan dolaşımının değişimi.

Bir çok düzenli, kontrollü çalışma ve analiz (meta-analiz) göstermiştir ki; çok kaplamalı varis bantlarıyla yapılan tedavi günümüzün en etkili tedavisidir. Bazı «kanıtlanmış» çalışmalar, bu tıbbi varis çoraplarının iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. (H.Partsch ve M.A Harakova WMW 1994; 144, 242-24). Hatta bir çalışmada da, birbiri üstüne uygulanan iki varis çorabı daha da iyi sonuçlar vermiştir (SIGVARIS Thrombo and SIGVARIS 503 çorapları).

PRATİK YÖNTEMLER



- Fizyolojik sölüsyonla ülseri temizle
- Ülseri yapışmaz, emici bir sargı beziyle sar
- Özellikle bilek arkasındaki lokal basıncı artırmak için, köpük kauçuk yastık uygulanması önerilir
- Lokal bandajı sabitlemek için SIGVARIS tromboz tedbiri (prophylaxis) çorabını tatbik edin
- Tromboz çorabının üzerine bir SIGVARIS 503 çorabı geçirin
- Yürüyüş yapmanız tavsiye olunur
- Gece vakti SIGVARIS 503 çorabını çıkartınız. Thrombo çorabı sızıntı durumunda değiştirilir



Lastik eldivenler

Kolay kayma

SOS:SLIP-ON-SIGVARIS

SIGVARIS aksesuarları
Her türlü kolay ve rahat
çorap sabitlenmesi için.

TÜM ÜRÜN ÇEŞİDİ – SIGVARIS Varis Çorapları Geleneksel 500



SIGVARIS
503 + 504 + 505

A-D Açık Parmak
Diz Altı (calf)



SIGVARIS
503 + 504 + 505

A-F Açık Parmak
Diz Kask Ortası
503+504 (half-thigh)




SIGVARIS
503 + 504 + 505

A-G Açık Parmak
Kasiğa kadar
503+504 (thigh)




SIGVARIS
503 + 504

A-G SIGVARIS
503+504 Açık
Parmak Tek Bacak
(thigh)

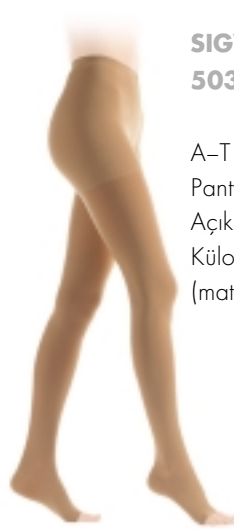

SIGVARIS
503

A-T SIGVARIS 503
Panty Külütlü Çorap-
Açık Parmak + Hamile
Külütlü Çorabı
(maternity)

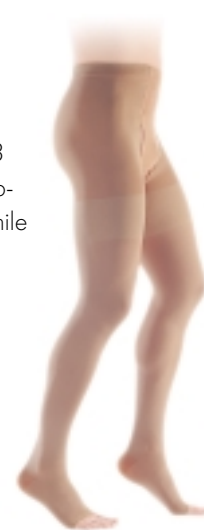


SIGVARIS
503

A-T SIGVARIS 503
Açık Parmaklı Erkek
külütlü Çorabı (panty
for men)



SIGVARIS
503+504

Ameliyat Sonrası
Parça olarak mevcut:
■ A-G Bel Bağlantılı
tek bacak
(sağ/sol) kasiğa
kadar basınçlı
■ 2 adet ince beyaz
parça

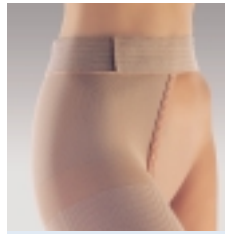


Bel bağlantılı tek
bacak, sağ yan, sol
yan sabitlemeli



Kasiğa kadar anti
trombo silikonlu
çorap

**Bütün modeller açık/kapalı parmak olarak
mevcuttur ve özel olarak imal edilebilirler**

BEDENLER VE MODELLER

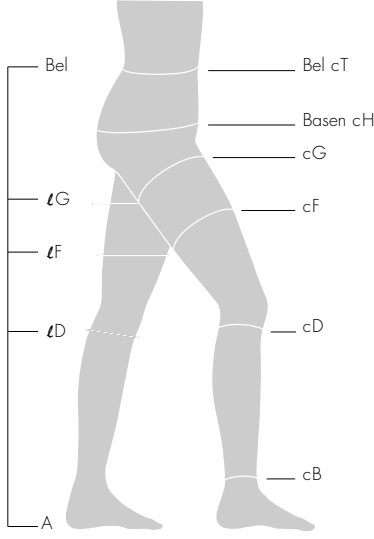

cm olarak bilek çevresi (circumference)						
	küçük		orta		geniş	
	Normal	PLUS	Normal	PLUS	Normal	PLUS
cT	80 'e kadar	80 'e kadar	90 'a kadar	90 'a kadar	100'e kadar	100'e kadar
cH	110'a kadar	110'a kadar	120'ye kadar	120'ye kadar	130'a kadar	130'a kadar
cG	52'ye kadar	60 'a kadar	60 'a kadar	68 'e kadar	68 'e kadar	76'ya kadar
cF	50'ye kadar	54 'e kadar	57'ye kadar	62'ye kadar	64 'e kadar	70 'e kadar
cD	34 'e kadar	38 'e kadar	37'ye kadar	42'ye kadar	40 'a kadar	46'ya kadar
cB	19 - 23	19 - 23	23 - 26	23 - 26	26 - 29	26 - 29

Uzunluk (length)			
	kısa	uzun	x-uzun
ℓ-D	37 cm'ye kadar	38 cm ve üstü	
ℓ-F	60 cm'ye kadar	61 cm ve üstü	
ℓ-G	70 cm'ye kadar	71 cm ve üstü	
ℓ-G	70 cm'ye kadar	70 cm - 78 cm	78 cm ve üstü

■ Belden bağcıklı kasiğa kadar olan model ameliyat sonrası içindir

Plus modeller:

Bilek ve kask kısımları daha geniş

Örnek:

- A-D çorap:
d kısmında daha geniş ölçü
- A-F çorap:
f kısmında daha geniş ölçü
- A-G çorap ve A-T çorap:
f ve g kısmında daha geniş ölçü

Özel yapım:

Bütün modeller açık/kapalı parmak olarak mevcuttur ve özel olarak imal edilebilirler

DOĞAL KAUKÇUK KALİTESİ									
Seri	Basınç sınıfı	Model	açık parmak	Normal S, M, L	PLUS S, M, L	kısa	uzun	x-uzun	renk:
									bej/77
503	2	A-D Dizaltı	●	●	●	●	●	●	●
		A-F Diz Üstü	●	●	●	●	●	●	●
		A-F Diz Üstü silikonlu	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Kasiğa kadar	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Kasiğa kadar silikonlu	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Kasiğa kadar belden bağcıklı	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Ameliyat sonrası (Kasiğa kadar belden bağcıklı)	●	●	●	●	●	●	●
		A-T Külotlu	●	●	●	●	●	●	●
504	3	A-D Dizaltı	●	●	●	●	●	●	●
		A-F Diz Üstü	●	●	●	●	●	●	●
		A-F Diz Üstü silikonlu	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Kasiğa kadar	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Kasiğa kadar silikonlu	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Kasiğa kadar belden bağcıklı	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Ameliyat sonrası (Kasiğa kadar belden bağcıklı)	●	●	●	●	●	●	●
		A-T Külotlu erkek	●	●	●	●	●	●	●
505	4	A-D Dizaltı	●	●	●	●	●	●	●
		A-F Diz Üstü	●	●	●	●	●	●	●
		A-G Kasiğa kadar	●	●	●	●	●	●	●

GANZONI & CIE AG
Gröblistrasse 8
CH-9014 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 279 33 66
Fax +41 (0)71 274 29 29

FIRATLAR LTD.
Generali Han 31-33,
Kat. 2, No. 24
303 Karaköy-Istanbul/Turkey
Tel. +90 212 244 31 24
Faks. +90 212 249 45 49
info@firatlar.com

GANZONI
improving quality of life
SIGVARIS
www.sigvaris.com